

Guide de test de terrain

À compléter

⚠ **ATTENTION** : Ce bandage a été conçu en se basant sur des bandages israélien existants, pour autant ce n'est pas du matériel médical agréé et il doit donc être utilisé selon votre propre jugement. ⚠

Table 1: Procédure d'application basée sur notre expérience limitée :



Étape 1.a : Clippez le levier sur le pansement compressif, tout en maintenant une pression sur la plaie de la victime (si elle est consciente elle peut maintenir la pression elle-même).

Étape 1.b (alternative) : Appliquez le bandage sur la plaie et faites un seul tour autour du membre de la victime.

(en utilisant un velcro) : si vous utilisez un velcro, vous pouvez scratcher le levier au-dessus de la blessure dès maintenant.



Étape 2.a : Faites un seul tour autour du membre de la victime et glissez le levier pour qu'il soit au niveau de la plaie.

Étape 2.b (alternative) : Placez le levier directement sur la plaie avant de terminer le premier tour et passez le bandage à travers le passage intérieur.



Étape 3 : Faites un autre tour autour du membre et passez le pansement dans le passage principal du levier.



Étape 4 : Vous pouvez faire un autre tour, puis faites basculer le levier pour générer la pression en enroulant le bandage autour du membre dans l'autre sens.



Étape 5 : Continuez à faire le tour du membre pour maintenir efficacement le levier.



Étape 6 : Quand vous avez fini d'enrouler le bandage, maintenez le en place en glissant le bout du bandage dans un autre bout du bandage qui est bien tendu.
